



MEDintim
personal healthcare



Jeu de *dilatateurs*

Dilatateurs vaginaux en silicone

Utilisation

Dilatateurs médicaux en silicone pour utilisation personnelle lors d'exercices de dilatation. Selon le développement, introduire les dilatateurs les uns après les autres dans le vagin en commençant par le plus petit et les laisser en place quelques minutes. L'introduction peut se faire en position couchée ou debout, avec une jambe sur une chaise.

Sauf en cas de recommandation contraire du médecin, ces exercices doivent être répétés tous les jours. Il n'existe pas de durée maximale d'utilisation des dilatateurs.

Lorsque le plus petit dilatateur n'entraîne pas d'inconfort, nous recommandons de passer ensuite directement à la taille supérieure car les muscles vaginaux sont alors déjà relâchés. Le même principe s'applique lors du passage à d'autres tailles.

Lorsque l'introduction du dilatateur de la taille maximale n'entraîne pas d'inconfort, une relation sexuelle avec pénétration peut être envisagée.

Domaines d'utilisation:

- En cas d'inconfort vaginal et de problèmes lors des rapports sexuels avec pénétration
- dus à un vaginisme,
 - dus à une dyspareunie (douleurs chez la femme lors des relations sexuelles)
 - suites à une opération gynécologique
 - après un accouchement

Contenu:

- 6 dilatateurs en silicone

Couleur	Diamètre A/B	Longueur C
Jaune	11/13 mm	65 mm
Rouge	17/19 mm	75 mm
Bleu	19/22 mm	90 mm
Violet	22/25 mm	110 mm
Rose	29/33 mm	130 mm
Gris-bleu	35/41 mm	150 mm

- Lubrifiant SYLK (soluble dans l'eau)
- Sac (Polyester)

Matériel:

Dilatateurs en silicone

EAN 401327300079 6

Réf. art.: MED DIL SET

CE Produit médical



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Moerfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20
Fax +49 (0) 6105 45 59 01
Email: service@medintim.de



www.medintim.de